

Z4 RIEPILOGO ISTRUZIONI D'USO

PROPORZIONI DI MESCOLO

BUSTA da 160 gr.

LEGHE NON PREZIOSE **38 ml. LIQUIDO (100%)**
36 ml. LIQUIDO + 2ml. ACQUA DIST.(95%)

LEGHE A BASE DI PALLADIO **26,5 ml. LIQUIDO** **11,5 ml. ACQUA DIST.**

LEGHE MEDIO TITOLO AUREO **23 ml. LIQUIDO** **15 ml. ACQUA DIST.**
(50% au)

LEGHE ALTO TITOLO AUREO **17,5 ml. LIQUIDO** **17,5 ml. ACQUA DIST.**
(OLTRE IL 70% au)

MESCOLO E COTTURA RAPIDA

ATTENDERE ALMENO 30 MINUTI (MA ANCHE OLTRE!) PRIMA DI INSERIRE IL CILINDRO NEL FORNO PRERISCALDATO ALLA TEMPERATURA FINALE (CONSIGLIATA 850°).

STABILIZZARE DA UN MINIMO DI 30 MINUTI (1 SOLO CILINDRO DA 3X) A UN MINIMO DI 50 MINUTI (1 SOLO CILINDRO DA 9X).